

INSTRUCTIONS ORALES

Ci-dessous, vous trouvez les instructions à lire aux personnes utilisant MedDrive pour la première fois. Seul le texte en noir est à lire à haute voix.

- Nous allons mesurer votre vitesse d'exécution à la détection d'un mouvement.

APPUYEZ sur « Détection d'un mouvement »

Détection de mouvement

APPUYEZ sur « continuer »

- Veuillez fixer du regard la croix. A un moment donné, une flèche va apparaître au centre de l'écran.

APPUYEZ sur « continuer »

- Cette flèche indique un de ces huit carrés (*montrez les huit carrés avec le curseur de la souris*). Tous les autres carrés sont là pour vous distraire. En l'occurrence, la flèche indique ce carré-ci.

APPUYEZ sur « continuer »

- Au même moment qu'apparaît la flèche, les lignes dans les carrés vont se mettre à bouger. Le but de l'exercice est de détecter le sens du déplacement des lignes dans le carré indiqué par la flèche.

APPUYEZ sur « continuer »

- En l'occurrence elles se déplacent vers « ... » (*donnez la réponse le haut/le bas/la gauche/la droite*). Dès que vous avez détecté le sens du déplacement, il faut appuyer sur la touche espace.

APPUYEZ sur « continuer »

- Vous aurez alors tout le temps pour donner la réponse. Afin de voir si vous avez bien compris, veuillez m'indiquer la réponse du sens de déplacement des lignes dans cet exemple ci...

Attendre la réponse, corriger si nécessaire en montrant le bon carré, puis APPUYEZ sur « continuer »

- Et ici ?

Attendre la réponse, corriger si nécessaire en montrant le bon carré, puis APPUYEZ sur « continuer »

- Et ici ?

Attendre la réponse, corriger si nécessaire en montrant le bon carré, puis APPUYEZ sur « continuer »

- Vous allez maintenant pouvoir vous entraîner. Il est important d'appuyer sur la touche espace dès que vous avez détecté le mouvement et ceci avant même que vous ayez formulé la réponse dans votre tête.

APPUYEZ sur « continuer » et effectuez l'entraînement. Il est important de cliquer sur le « ? » à chaque fois que la personne donne oralement la réponse avant d'avoir appuyé sur la touche espace. L'entraînement s'arrête automatiquement après que la personne ait réussi cinq épreuves.

- Nous allons maintenant pouvoir commencer l'épreuve qui dure moins de trois minutes.

APPUYEZ sur « départ »

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES FACULTATIVES

La tâche se déroule habituellement dans le silence. Il peut cependant être nécessaire de donner des instructions supplémentaires dans certaines conditions.

1. **La personne donne la réponse oralement avant d'appuyer sur la touche espace :**
 - Il vous faut d'abord presser la touche puis me donner la réponse. Vu que vous ne l'avez pas fait, cette mesure est invalidée.
2. **Espace entre le clavier et le doigt (>1cm):**
 - Veuillez maintenir durant toute la durée de l'exercice le contact avec la touche espace.
3. **Maintient la barre d'espace appuyé (empiète sur le cycle suivant):**
 - Veuillez pressez la touche brièvement au moment où vous voyez apparaître le carré blanc.
4. **Ne presse pas la touche assez fort : la personne presse une deuxième fois pour continuer l'épreuve.**
 - Veuillez presser suffisamment fort pour activer la touche.

ERREURS

Lorsque la personne exécute l'exercice de manière non prévue et que ceci biaise les résultats, il y a alors erreur (lapse). Ceci peut nécessiter de répéter une mesure ou de reprendre l'ensemble de l'épreuve depuis le début.

1. **Donne la réponse oralement avant d'appuyer sur la touche espace.**

Signalez l'erreur et pressez sur « ? » ou sur « E » et laissez la personne poursuivre l'épreuve. Le logiciel comptabilise ceci automatiquement comme étant une erreur. A la fin de l'épreuve, dans les résultats, le logiciel rapporte le nombre d'erreur produit. Si la personne effectue 10 erreurs ou plus, il peut être nécessaire de refaire l'épreuve dans son entier.
2. **La personne presse la barre d'espace avant avoir vu le sens de déplacement des lignes.**

Donnez comme réponse le « ? ». Le logiciel comptabilise ceci automatiquement comme étant une erreur. A la fin de l'épreuve, dans les résultats, le logiciel rapporte le nombre d'erreur produit. Si la personne effectue 10 erreurs ou plus, il peut être nécessaire de refaire l'épreuve dans son entier.
3. **La personne n'a pas appuyé sur la touche espace suffisamment fort.**

Signalez l'erreur et pressez sur « ? » ou sur « E » et laissez la personne poursuivre l'épreuve. A la fin de l'épreuve, dans les résultats, le logiciel rapporte le nombre d'erreur produit. Si la personne effectue 10 erreurs ou plus, il peut être nécessaire de refaire l'épreuve dans son entier.
4. **La personne n'avait pas le doigt reposé sur la barre espace au moment de devoir appuyer sur la touche.**

Signalez l'erreur et pressez sur « ? » ou sur « E » et laissez la personne poursuivre l'épreuve. A la fin de l'épreuve, dans les résultats, le logiciel rapporte le nombre d'erreur produit. Si la personne effectue 10 erreurs ou plus, il peut être nécessaire de refaire l'épreuve dans son entier.
5. **La personne mets plus de 5 secondes pour appuyer sur la touche espace.**

Le logiciel comptabilise ceci automatiquement comme étant une erreur sans intervention de l'observateur. A la fin de l'épreuve, dans les résultats, le logiciel rapporte le nombre d'erreur produit. Si la personne effectue 10 erreurs ou plus, il peut être nécessaire de refaire l'épreuve dans son entier.